

BEST PRACTICE

PERFECTDOME CHECKLIST ✓



Gebruik een reinigingsdoekje voor je hoortoestellen om vuil aan de buitenkant te verwijderen voordat je deze in de PerfectDome plaatst.



Sluit bij gebruik van oplaadbare hoortoestellen het laadstation aan op de PerfectDome. Hierdoor worden de hoortoestellen tijdens het onderhoud direct opgeladen.



Zorg dat de klep goed gesloten is voordat je de PerfectDome aanzet. Dit is belangrijk voor de beste werking van de droog- en UV-C functies.



Laat de PerfectDome de hele cyclus afmaken voor de beste resultaten. Het apparaat schakelt automatisch uit als de cyclus voltooid is.



Koppel de PerfectDome los van de stroom als je het apparaat niet gebruikt, vooral als je energie wilt besparen. Dit is ook beter voor het milieu.



Maak de PerfectDome elke week even schoon en zorg dat de binnenkant droog blijft voor een lange levensduur en goede hygiëne.



Reinig en droog je hoortoestellen elke avond met de PerfectDome. Dit zorgt voor betere hygiëne, comfort en voorkomt storingen.
